




Rainoak

REVITALIZADOR CORPORAL

Energize o seu corpo com o Revitalizador Corporal, desenvolvido para quem busca relaxamento profundo, é um aparelho para alívio de dores e desconfortos físicos a qualquer hora.

Trabalha com terapias de auto cuidado, como a Massagem que se desenvolve através dos micropontos situados em toda a extensão do Revitalizador, com o objetivo de relaxar o corpo em pontos estratégicos.

A Vibroterapia com o sistema de vibração em que o objetivo é aumentar e melhorar a circulação sanguínea do local da aplicação e a Termoterapia com o sistema de calor que potencializa os efeitos de relaxamento e aumento da circulação em regiões do corpo – pescoço, lombar, coxas e panturrilhas – o que faz com que os resultados sejam potencializados e vistos com mais agilidade.

Ações e Benefícios

- Massageador Portátil
- Melhora hidratação e elasticidade da pele.
- Proporciona relaxamento muscular, aliviando o stress, cansaço e tensão.
- Ativa a circulação sanguínea acelerando o processo de renovação celular, eliminando toxinas dos tecidos diminuindo o inchaço.
- Combate as dores localizadas e o cansaço muscular.
- Ativa o sistema linfático.

Indicações

- Melhora da circulação sanguínea
- Dores musculares
- Relaxamento
- Dores vasculares
- Cervicalgias
- Lombalgias

DADOS ELÉTRICOS

Peso: 2,0 kg

Tamanho: 1700 x 500 x 40mm

Composição: Espuma em densidade D28, acabamento em tecido corvin, com 04 motores e resistência térmica.

A Esteira é um produto bivolt automático, que funciona na faixa de 100 ~ 240V.

 **16** tipos de massagens

 termoterapia

 **05** níveis de intensidade

 vibroterapia

 **04** pontos de massagem

 desligamento automático - 30 min

 bivolt



O Revitalizador Corporal é muito dinâmico de se utilizar, utilize-o em sofás, colchões ou mesmo no chão.

COLCHONETE ANATÔMICO

Com sistema eletrônico de massagem através de micromotores, o Colchonete Anatômico, emite ondas eletromagnéticas na parte superior para trabalhar diretamente em áreas afetadas por dores e desconfortos.

Seu controle digital, desempenha 16 tipos diferentes de massagens, sendo você o responsável por escolher qual tipo, intensidade e frequência que se adequa a sua necessidade. Possui tecnologia SMD, sistema inteligente que garante a segurança durante o uso.

Ligado a quatro motores em pontos vitais do organismo – pescoço, lombar, coxas e panturrilhas – ele respeita a anatomia do seu corpo e o acolhe, sua função térmica na região da lombar, varia entre as temperaturas 37°C e 45°C, o que relaxa diretamente toda musculatura dessa região.

Ideal para quem busca momentos de tranquilidade e qualidade de saúde.

Ações e Benefícios

- Massageador Portátil
- Fácil de usar
- Proporciona relaxamento
- Design moderno
- Estrutura anatômica
- Pode ser utilizado em sofás, camas, chaise, chão entre outros.
- Fácil higienização

Indicações

- Melhora da circulação sanguínea
- Dores musculares
- Relaxamento
- Dores vasculares
- Cervicalgias e Lombalgias



Escaneie esse QR Code para ter acesso às informações adicionais deste produto.

DADOS ELÉTRICOS

Peso: 2,2 kg

Tamanho: 1700 x 550 x 65mm

Composição: Espuma em densidade D28, acabamento em tecido corvin, com 04 motores e resistência térmica.

A Esteira é um produto bivolt automático, que funciona na faixa de 100 ~ 240V.

 **16** tipos de massagens

 termoterapia


 **05** níveis de intensidade

 vibroterapia

 **04** pontos de massagem

 desligamento automático - 30 min

 bivolt

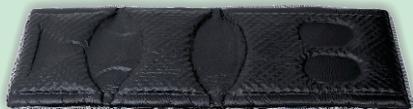

Suas camadas de espuma em formato anatômico, oferecem maior conforto ao usuário, relaxando os músculos nervos e coluna vertebral.

COLCHONETE ANATÔMICO

com perfilado terapêutico

O Colchonete Anatômico com perfilado terapêutico é um aparelho elétrico de massagem vibratória, indicada para alívio de stress, fadiga e cansaço físico, desbloqueia pontos de tensão do corpo e ativa a circulação sanguínea.

Contém em seu interior a espuma perfilada terapêutica, desenvolvida em forma de casca de ovo, o que proporciona uma interação mais profunda do toque com a região massageada, intensificando o seu relaxamento. Na superfície, espumas em formatos anatômicos são montadas e alocadas para fornecer total conforto aos músculos e a coluna vertebral.

Acompanha controle digital responsável pelo controle total da sua massagem – tempo, intensidade e região – entre os 16 tipos de massagens terapêuticas, trabalha exclusivamente com as quatro regiões mais sobrecarregadas durante o dia-a-dia – pescoço, lombar, coxas e panturrilhas – incluindo na área lombar, sistema de aquecimento, que varia de 37°C e 45°C para auxílio imediato no combate as dores e desconfortos musculares.

Ações e Benefícios

- Massageador Portátil
- Fácil de usar
- Proporciona relaxamento
- Design moderno
- Estrutura anatômica
- Pode ser utilizado em sofás, camas, chaise, chão entre outros.
- Fácil higienização

Indicações

- Melhora da circulação sanguínea
- Dores musculares
- Relaxamento
- Dores vasculares
- Cervicalgias e Lombalgias



Escaneie esse QR Code para ter acesso às informações adicionais deste produto.

DADOS ELÉTRICOS

Peso: 3,5 kg

Tamanho: 1700 x 550 x 65mm

Composição: Espuma em densidade D28, acabamento em tecido corvin, com 04 motores e resistência térmica.

A Esteira é um produto bivolt automático, que funciona na faixa de 100 ~ 240V.

 08 pastilhas magnéticas

 08 pastilhas de infravermelho longo

 16 tipos de massagens

 05 níveis de intensidade

 04 pontos de massagem

 perfilado terapêutico

 termoterapia

 vibroterapia

 desligamento automático - 30 min

 bivolt



Modelo único com espuma perfilado terapêutico, responsável por promover uma massagem profunda e relaxante, conhecida como "DO-IN". Sua terapia é potencializada com a tecnologia magnética e infravermelho longo, que desintoxica nossas células durante o uso.

REVITALIZADOR PROFISSIONAL

As mudanças constantes no mercado de estética em nosso país, nos força a manter nossos produtos sempre atualizados, por isso desenvolvemos o Revitalizador profissional para atender o mercado com qualidade, diferenciação, segurança e tecnologia.

Seu tamanho é o maior do mercado, acomodando bem pessoas com alta estatura. Em seu interior constam 12 pastilhas magnéticas e 12 pastilhas de infravermelho longo. Seu sistema de massagem e aquecimento é totalmente digital e seguro, possibilitando o uso diversas vezes diariamente.

O Revitalizador contém 02 sensores térmicos, um na parte superior e outro na inferior, no qual “varrem” o produto, impossibilitando seu super aquecimento. Quando acionado, o sistema de aquecimento atua na área superior e inferior do Revitalizador, Profissional, mantendo sua temperatura entre 45 a 55 °C.

Seu projeto elétrico respeita normas nacionais e internacionais, tais como INMETRO, ANVISA E CE. É a única com seis motores e controle digital.

O revestimento é feito com material náutico, que suporta altas temperaturas, dobras físicas e o peso máximo suportado é de 120 kg.

Ações e Benefícios

- Relaxamento muscular
- Quebra de gordura
- Redução de medidas
- Drenagem e aumento da circulação sanguínea

Indicações

- Melhora da circulação sanguínea
- Dores musculares
- Relaxamento
- Dores vasculares
- Cervicalgias
- Lombalgias



Escaneie esse QR Code para ter acesso às informações adicionais deste produto.

DADOS ELÉTRICOS

Peso: 3,5 kg

Tamanho: 1650 x 650 x 65mm

Composição: Espuma em densidade D28, acabamento em tecido náutico, com 06 motores e 02 resistências térmicas. O Revitalizador Profissional é um produto bivolt automático, que funciona na faixa de 100 ~ 240V.

 **16** tipos de massagens

 **05** níveis de intensidade

 **04** pontos de massagem

 **08** pastilhas magnéticas

 **08** pastilhas de infravermelho longo

 termoterapia

 vibroterapia

 desligamento automático - 60 min

 bivolt

 perfilado terapêutico



O Revitalizador Profissional é um produto fácil e prático, indispensável nas clínicas de estética atualmente.

CONCHONETE ODONTOFLEX

O Conchonete OdontoFlex foi criado para proporcionar ao paciente um agradável conforto e relaxamento durante o atendimento, colaborando também com o trabalho do profissional da área odontológica. Seu formato em curvas torna a OdontoFlex um modelo universal adaptado para funcionar nos vários modelos e marcas disponíveis como KAVO, DAVIATLANTE, OLSEN, entre outras.

Seu sistema de massagem é totalmente digital, com 16 funções de massagem, 05 níveis de intensidade, 05 pontos de massagem, sendo 01 superior lombar, 02 inferior lombar, 01 coxas e 01 panturrilhas. Possui programação para desligamento automático em até 30 minutos e tecnologia SMD, um sistema inteligente que garante a segurança durante o uso.

O acabamento é em tecido náutico de alta durabilidade e sua espuma conta com tratamento anti-ácaro. Suas travas laterais tem regulagem que facilita ao fixá-lo no equipo independente da marca ou modelo. Para melhor durabilidade o produto acompanha um suporte plástico que fica aos pés do paciente, protegendo o equipamento, o que facilita a higienização com álcool 70.

Ações e Benefícios

- Fácil de usar
- Proporciona relaxamento ao paciente
- Fácil higienização
- Diferencial para o consultório
- Design Moderno

Indicações

- Melhora da circulação sanguínea
- Dores musculares
- Relaxamento
- Cervicalgias
- Lombalgias



Escaneie esse QR Code para ter acesso às informações adicionais deste produto.

DADOS ELÉTRICOS

Peso: 2,5 kg

Tamanho: 1500 x 550 x 60mm

Composição: Espuma em densidade D26, acabamento em tecido náutico, e suporte nos pés em plástico cristal 0,20mm. O Colchonete OdontoFlex é um produto bivolt automático, que funciona na faixa de 100 ~ 240V.

 16 tipos de massagens

 05 níveis de intensidade

 05 pontos de massagem

 vibroterapia

 desligamento automático - 30 min

 bivolt


Disponíveis nas cores:

-  Azul marinho
-  Azul céu
-  Azul claro
-  Vinho
-  Verde claro
-  Laranja
-  Creme
-  Bege
-  Cinza

 adaptável a várias marcas e modelos

 fivelas para fixação

 plastificação nos pés

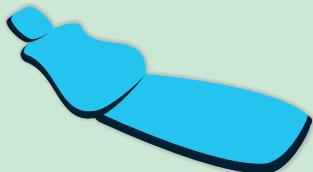

O OdontoFlex é um produto que proporciona conforto e relaxamento, promovendo tranquilidade aos pacientes das clínicas de odontologia.

CONTROLE

Para começar a usar nossos produtos, pressione o botão ligar (1). O botão ligar  , ele tem duas funções, ligar e desligar.

Ao iniciar o produto, ele estará no modo automático, com funcionamento de 30 minutos.


Para desligar, pressione novamente o botão  .

Modo Automático

Funções de massagem de 01 em 01 minuto.

O modo automático é contínuo, ou seja, quando acionado ele continuará a partir da vibração atual.

Para identificar se ele está acionado, basta verificar se o círculo ao lado da palavra auto está com o led ligado.

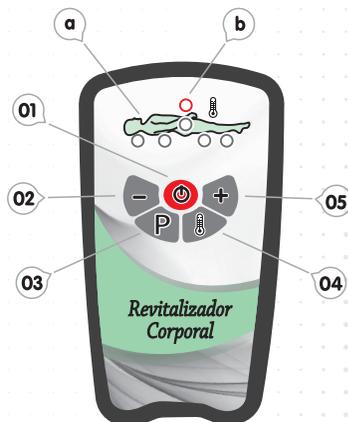

Calor

Quando pressionar o botão calor (4) do controle, o círculo da ampulheta vermelha ficará com o LED piscando, informando que a temperatura está no forno.

Ao pressionar mais um toque no botão calor, o LED ficará aceso (b), e o aquecimento estará no máximo. Ao ser acionado, o produto irá se aquecer durante 30 minutos e depois se auto desligará.



Obs.: Caso o produto esteja funcionando, conta-se o tempo de desligamento com referência na vibração, ou seja, se estiver funcionando por 20 minutos e o calor for ativado, o produto se desligará totalmente nos próximos 10 minutos.


Para desligar a função, basta pressionar o botão novamente.

Pontos

O produto possui quatro áreas de massagem:

01 Ombros 02 Lombar 03 Coxas 04 Panturrilhas

Cada ponto está representado pela posição do boneco deitado, conforme imagem abaixo (a).

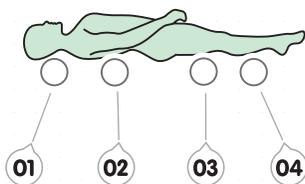

A função pontos é acionada através do botão (3), cada vez que for pressionado ele irá desligar alguns pontos e ligar outros. É possível fazer 16 combinações distintas.

(Acompanhe os pontos acionados através dos LEDs abaixo do boneco).



Potência

É a intensidade da vibração, começa do zero (mínimo) até sete (máximo).

O controle inicia automaticamente, no nível de potência três, oferecendo uma massagem relaxante e confortante.

Pressionando o botão + (5) a intensidade aumentará e pressionado o botão - (2) ele diminuirá.



Este botão tem a função “turbo” que é só pressionar e segurar, que a intensidade aumentará rapidamente.

FUNÇÕES DE VIBRAÇÃO

Conheça detalhadamente cada uma das 16 Funções de Vibração para a massagem:

- 01 O colchonete vibra constantemente.
- 02 O colchonete oscila a vibração de 01 em 01 segundo, dando sensação que liga e desliga rapidamente.
- 03 Formato onda, a massagem começa na cabeça até os pés, e volta dos pés à cabeça.
- 04 Oscila a vibração 05 vezes e depois mantém uma vibração longa de 04 segundos.
- 05 Formato onda invertida, a massagem começa nos pés até cabeça e volta da cabeça aos pés.
- 06 A massagem inicia ponto a ponto até todos estarem contínuos, após 03 segundos se desligam um a um.
- 07 O inverso da massagem 06.
- 08 Onda rápida, um segundo cada ponto da cabeça aos pés e vice versa.
- 09 Massageia dois pontos por vez, ombro e panturrilha e pescoço e coxas.
- 10 Massageia dois pontos por vez, ombros e coxas e pescoço e panturrilhas.
- 11 Massageia dois pontos por vez, pescoço e ombros, coxas e panturrilhas.

Sistema PWM

As massagens a seguir elas aumentam e diminuem a intensidade sozinhas.

- 12 Todos os pontos oscilam a vibração do mínimo ou máximo.
- 13 Massagem circular, aciona o pescoço e panturrilha e o ombro e a panturrilha, oferecendo um estímulo circular.
- 14 O inverso da massagem 13.
- 15 Massagem de dentro para fora, vibrando os motores internos oscilando para os externos.
- 16 Randômico, todos os tipos de vibração funcionam por 10 segundos. Nesta função o LED do automático piscará rapidamente, informando ao usuário que está na última massagem.

LIMPEZA DO PRODUTO

- Desligue da tomada antes de limpar.
- Não use pano úmido para a limpeza, apenas seco. Caso o controle esteja engordurado, utilize uma quantidade mínima de álcool em um pano.
- Não utilize produtos de limpeza fortes ou substâncias abrasivas, pois podem danificar a parte externa do aparelho.
- Não passe álcool enquanto o produto estiver quente.
- Caso a unidade fique sem ser usada por um longo período, por favor, limpe e guarde-a em um saco plástico e/ou uma caixa.

RECOMENDAÇÕES

- Antes de usar o produto, leia atentamente o manual;
- Insira o plug de energia quando a unidade estiver desligada;
- Sempre remova o pino da tomada após o uso;
- Não é aconselhável usar em pessoas com doenças contagiosas;
- É proibido a utilização em banheiros ou locais que estejam molhados;
- Não guarde o aparelho na presença de calor ou inflamável
- Não pule sobre a aparelho, pois poderá prejudicar seus mecanismos;
- Nunca abra ou viole o tecido do aparelho, caso isso aconteça o produto perde a assistência de fábrica;
- O usuário nunca deve tentar consertar o aparelho. Por favor, entre em contato com o distribuidor;
- Aconselhamos o usuário do aparelho que primeiramente utilize velocidades moderadas, começando cada sessão apenas com poucos minutos. Gradualmente, aumente o tempo, intensidade e vibração de acordo com as suas necessidades.

Cuidados Operacionais

- A cada utilização deve ser respeitado o tempo de 30 minutos de espera (desligado).
- Nunca utilize o aparelho por mais de duas horas consecutivas sem intervalos de 30 minutos.

CERTIFICADO DE GARANTIA

INTRANSFERÍVEL

Nos termos e condições abaixo, de propriedade do Sr(a) _____

está garantido por 12 meses contra possíveis erros de fabricação.

Condições de Garantia

Apresentando qualquer avaria V.sa. deverá entrar em contato imediato com a empresa para que seu aparelho seja revisado, obedecendo os seguintes critérios:

1. Dentro do período de vigência de garantia, quando a avaria se der por defeito de fabricação, a revisão é gratuita.
2. Nos casos de avaria por descuido ou uso incorreto, será feita a revisão do aparelho avariado mediante pré-orçamento das peças para conserto, mesmo estando com a garantia vigente.
3. Ocorrendo a avaria após a vigência da garantia, V.sa. terá direito a revisão do aparelho mediante o pagamento da taxa tratada no item "2" acima.
4. Em caso de rompimento do lacre a presente garantia se torna sem efeito.

Data: _____ de _____ de _____.

QUANDO NÃO HOUVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SUA CIDADE,
O NOSSO MEIO DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO SERÁ
ENCOMENDA NORMAL PELOS CORREIOS.

Baixe o APP para ler o QR Code e aproxime a câmera do seu celular para acessar diretamente a página de registro.



GANHE MAIS 6 MESES DE GARANTIA!

Registrando seu produto em nosso site, você ganha mais 6 meses de garantia. Acesse www.rainoah.com.br e registre o código de seu produto.



rainoahbemestar



@rainoahbemestar



(Versão 09/22)